

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

BẢNG KIỂM QUY TRÌNH KỸ THUẬT
DENGUE VIRUS IgM/IgG TEST NHANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-BVT ngày .../.../2019 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

Họ và tên nhân viên đánh giá:.....

Họ và tên nhân viên thực hiện:.....

Khoa:.....

Tên Bệnh nhân:.....Mã y tế:.....

Chẩn đoán:.....

Ngày vào viện:.....

Ngày đánh giá:.....

STT	Các bước thực hành	Điểm chuẩn	Điểm đạt
I	Quá trình trước xét nghiệm	4	
1	Trang phục đúng quy định (Áo blue, khẩu trang, dép kín mũi)	1	
2	Nhận mẫu xét nghiệm, kiểm tra chất lượng mẫu, thông tin mẫu trên dụng cụ chứa mẫu và trên giấy yêu cầu xét nghiệm đạt yêu cầu	1	
3	Đeo găng	1	
4	Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất thực hiện (bút viết kính, găng tay, test nhanh DENGUE IgM/IgG,...)	1	
II	Quá trình trong xét nghiệm	13	
1	Lấy ống serum đựng máu đưa vào máy ly tâm, ly tâm 5 phút, tách huyết thanh	2	
2	Lấy kit ra khỏi hộp đựng sản phẩm, xé bao chứa kit, đặt kit lên khay sạch bằng phẳng, ghi thông tin người bệnh, tuổi, khoa vào kit	1	
3	Lấy pipets nhựa có sẵn trong túi đựng kit, hút 5 µl (đến vạch định mức trên pipets) huyết thanh/huyết tương trong ống máu đã ly tâm, nhỏ vào giếng vuông của kit; Nhỏ 4 giọt chất dẫn vào giếng tròn	3	
4	Bấm đồng hồ hẹn giờ. 20 đọc kết quả		

5	Đọc kết quả: - Vạch C: vạch chứng - Xuất hiện mờ hoặc đậm ở vị trí M: dương tính IgM - Xuất hiện mờ hoặc đậm ở vị trí G: dương tính IgG - Xuất hiện mờ hoặc đậm ở vị trí M & G: dương tính IgM/IgG - Hai vạch M, G không xuất hiện: âm tính		
IV	Quá trình sau xét nghiệm	1	
1	Lưu kết quả vào sổ theo dõi, trả kết quả trên phần mềm	1	
V	Câu hỏi phụ	2	
1	Nguyên lý sử dụng kit nhanh Dengue IgM/IgG	2	

Ghi chú: QTKT tham khảo tại văn bản ban hành của Bộ Y tế

- Quyết định số 26/QĐ-BYT, ngày 03/01/2013 Về việc ban hành tài liệu: “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh”

- Hướng dẫn sử dụng bộ sinh phẩm

II. Nhận xét của người đánh giá:

Ưu điểm	Hạn chế	Đề xuất
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

NHÂN VIÊN THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN ĐÁNH GIÁ

(Ký và ghi rõ họ tên)